


マグチタン GEO 取扱説明書



■ 製品仕様

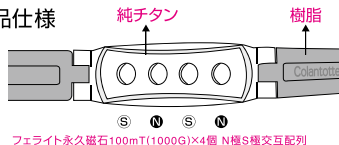

Spec: フェライト永久磁石
100mT(1000G)4個を交互配列
Material: 樹脂、ステンレス、純チタン
Size: フリーサイズ17~22cm
医療機器認証番号: 221AGBZX00163A05


■ 「マグチタン」は医療機器です。

「マグチタン シリーズ」は**医療機器**として認証されています。
100mTのフェライト永久磁石をN極S極交互配列で埋め込み、装着部位の**血行を改善し、コリを緩和します。**

■ 純チタン 採用

純チタン採用(バックル除く)で、とても軽い着け心地。
純チタンは汗や水に強く、錆びにくいのでスポーツシーンでも安心してご使用いただけます。
「マグチタン」シリーズは世界で活躍するアスリート達に愛用されています。


※使用している純チタンは、通常のご使用において錆びる心配はありません。

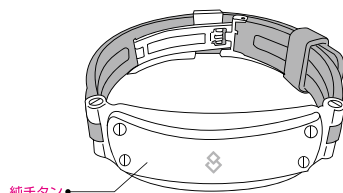


■ お手入れ方法・その他

- お手入れの際は中性洗剤を使用し、水で十分に洗い流した後、柔らかい布で拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。経年による劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくために、汗・皮脂・汚れ等は付着したままにせず、洗い流してください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で使用又は長時間放置しないでください。
- 薬剤や漂白剤は、使用しないでください。
- 腕に密着させて使用してください。
(本製品は、ブレスレットなど手首に使用する機器及び足首に使用する機器ではありません。)


■ 独自のN極S極交互配列

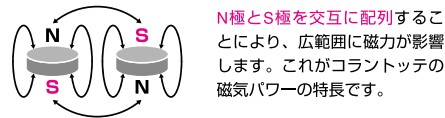

N極とS極を交互に配列することにより、広範囲に磁力が影響します。これがコラントットの磁気パワーの特長です。

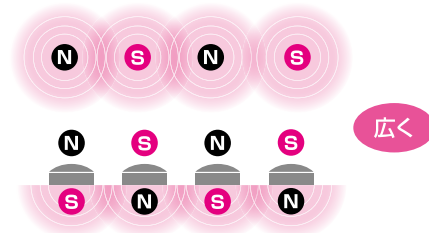


ベルトの着脱方法

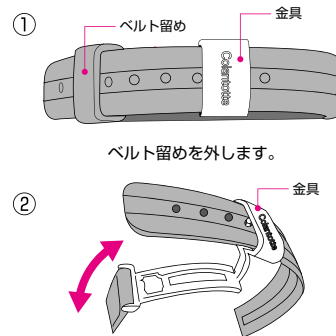

金具部分を持って開閉してください。
とめる際はカチッと音がするまで押し込んでください。
※逆方向に折り曲げると故障の原因になるのでご注意ください。

ベルトの長さ調整について

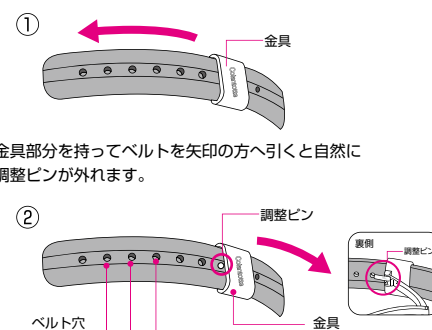

調整ピンをお好みの位置のベルト穴にセットしてください。
金具部分を持ってベルトを矢印の方へカチッと音がなるまで引き、ベルト留めを通せば完成です。

〈製品についてのお問い合わせは下記まで〉



製造販売元 株式会社コラントット
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-26
TEL(06)6258-7350 FAX(06)6258-7360
www.colantotte.jp ☎0120-080-523

MA01_R01