

コラントッテ TAO ネックレス

取扱説明書



Colantotte

〈製品についてのお問い合わせは下記まで〉



製造販売元 株式会社コラントッテ
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-26
TEL(06)6258-7350 FAX(06)6258-7360
www.colantotte.jp ☎0120-080-523

MA01_R16

～TAO～

TAOとは中国哲学で説かれている

「道」を表しています。

宇宙自然の普遍的法則や存在の根源、
美や真実の根元などを広く意味する言葉です。

すべての真理と説かれ、
悠然と変わることなく存在し、
揺ぎないもの。

それがTAOなのです。

■コラントッテ TAO ネックレスは医療機器です。

コラントッテ TAO ネックレスは
樹脂コーティング磁石を、独自の
N極S極交互配列で配置した
医療機器です。

医療機器として認証されている
本物の健康ギアの効果を、体感
できます。



独自のN極S極交互配列


■磁気の力で血行改善、コリを緩和。

ネックループ全体には磁気がコラントッテ独自の
N極S極交互配列で10mm間隔に配置されています。
これにより**磁力の広がり**が**立体的で広範囲に働きかけ**
ることができます。

コラントッテ TAO ネックレスは着けているだけで**首**
や肩などのコリに効きます。

■お手入れ方法・その他 ※FINO、スリム ARIEは別ページを参照
経年による変色・劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用
いただくため、以下の点にご注意ください。

- お手入れの際は…
【ループ】金属部分を選んで、中性洗剤をご使用のうえ、やさしく
手洗いし、汗・皮脂・汚れをこまめに洗い流してください。
【金属部分】汗・皮脂・汚れが付着したときは、やさしく拭き取って
ください。汚れが目立ってきたときは、中性洗剤をご使用のうえ、こす
らないようやさしく手洗いしてください。
ループ、金属部分ともに、手洗い後は、やさしく水気を拭き取
り、完全に乾いてからご使用ください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでくださ
い。入浴時は外してください。
- 製品に、化粧品類(スプレー・クリーム・香水含)が付着しない
ようにご注意ください。成分に含まれる油分及び揮発性成分
などにより、製品が傷む恐れがあります。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなど有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- 着脱の際は、必ず留具の根元とネックループを持って行ってくだ
さい。ループ本体のみを引っ張って取り外しを行わないくださ
い。留具の着脱テストは行っておりますが、ご使用の仕方によっ
ては、破損のおそれがありますので取り外しにはご注意ください。

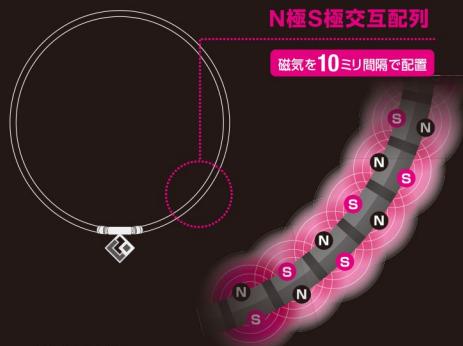

■製品仕様

Spec : 磁気を10mm間隔でN極S極交互配列
Material: <コラントッテ TAO ネックレス
RAFFIシリーズ / AURAシリーズ / ARANシリーズ / VEGA II /
スリム ARIE>
樹脂コーティング磁石、ステンレス
<コラントッテ TAO ネックレス FINO>
樹脂コーティング磁石、ステンレス、ポリエステル

■スリム ARIE お手入れ方法・その他

経年による変色・劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用
いただくため、以下の点にご注意ください。

- お手入れの際は…
【ループ】金属部分を選んで、中性洗剤をご使用のうえ、やさしく
手洗いし、汗・皮脂・汚れをこまめに洗い流してください。
【金属部分】汗・皮脂・汚れが付着したときは、やさしく拭き取って
ください。汚れが目立ってきたときは、中性洗剤をご使用のうえ、こす
らないようやさしく手洗いしてください。
ループ、金属部分ともに、手洗い後は、やさしく水気を拭き取
り、完全に乾いてからご使用ください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでくださ
い。入浴時は外してください。
- 製品に、化粧品類(スプレー・クリーム・香水含)が付着しない
ようにご注意ください。成分に含まれる油分及び揮発性成分
などにより、製品が傷む恐れがあります。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなど有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- 着脱の際は、必ず留具の根元とネックループを持って行ってくだ
さい。ループ本体のみを引っ張って取り外しを行わないくださ
い。
- 軽い力で着脱できる磁石式の留具のため、ジョイント外れに
よる落下にご注意ください。

■ジョイント部分の取り外し方

●TAO ネックレス RAFFI シリーズ

留具の根元とループを持ち
折るようにして外してください。



●TAO ネックレス AURA、ARANシリーズ

留具の根元とループを持ち
折るようにして外してください。



●TAO ネックレス VEGA II

留具の根元とループを持ち
折るようにして外してください。



■上記シリーズの留め方

凹側留具に平行に凸側留具をカチッと奥まで押し込んで
ください。(少し固めになっております)

■FINO お手入れ方法・その他


経年による変色・劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用
いただくため、以下の点にご注意ください。

- お手入れの際は、汗・皮脂・汚れが付着したときは、やさしく拭
き取ってください。汚れが目立ってきたときは、中性洗剤をご
使用のうえ、こすらないようやさしく手洗いしてください。手
洗い後は、やさしく水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用
ください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでくださ
い。入浴時は外してください。
- 繊細なポリエステル糸を使用して風合いを出していますので**乱暴
な取り扱いはお避けください。繊維が毛羽立ちやすくなります。**
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなど有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- 取り外しの際は必ず留具を持って上下に外してください。
- 留め具のネックループ繊維への影響を防ぐために**留具本体
が動きやすくなっている**ので、**その際は正常な位置に留具を
戻してご使用ください。**
- 運動・衝撃などにより留具が外れる場合がございますので、
ご注意ください。

■ジョイント部分の取り外し方

●TAO ネックレス FINO

必ずジョイント金具を持って
右記のように上下に引っ張ってください。

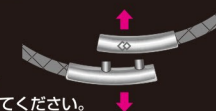


●TAO ネックレス 首の後ろに ジョイントがある製品

留具の根元とループを持って左右に引っ張ってください。



●TAO ネックレス スリム ARIE 留具の根元とループを持ち 矢印の方向へ引っ張ってください。

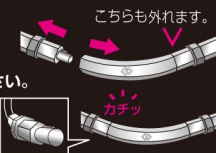

■TAO ネックレス スリム ARIEの留め方

ジョイントの突起部をカチッと奥まではめてください。