

コラントッテ TAO ループ

取扱説明書



Colantotte®

～TAO～

TAOとは中国哲学で説かれている「道」を表しています。

宇宙自然の普遍的法則や存在の根源、美や真実の根源などを広く意味する言葉です。

すべての真理と説かれ、悠然と変わることなく存在し、揺ぎないもの。

それが TAO なのです。

■ コラントッテ TAO ループは医療機器です。

コラントッテ TAO ループは樹脂コーティングゴム磁石を独自の N 極 S 極交互配列で配置した**医療機器**です。医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果を、独自の N 極 S 極交互配列で体感できます。



■ 磁気ので血行改善、コリを緩和。


ループ全体には55mTの磁気コラントッテ独自の N 極 S 極交互配列で10mm間隔配置されています。これにより**磁力の広がり**が立体的で**広範囲に働きかける**ことができます。

■ 製品仕様

Spec:
55mTの磁気を10mm間隔で
N 極 S 極交互配列


Material:
<コラントッテ TAO ループ ARIE>
樹脂コーティング磁石、ステンレス
<コラントッテ TAO ループレオオーネ>
樹脂コーティング磁石、ステンレス、
牛革

コラントッテ TAO ループは着けているだけで**腕などのコリに効きます**。

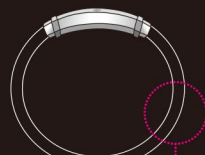

N 極 S 極 交互配列

55mT × 10mm 間隔

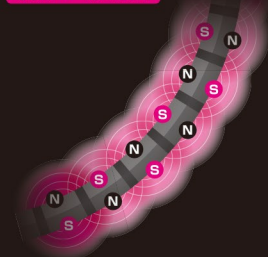

■ ループ ARIE お手入れ方法・その他

経年による変色・劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくため、以下の点にご注意ください。

- お手入れの際は…
【ループ】金属部分 avoiding、中性洗剤をご使用のうえ、やさしく手洗いし、汗・皮脂・汚れをこまめに洗い流してください。
【金属部分】汗・皮脂・汚れが付着したときは、やさしく拭き取ってください。汚れが目立ってきたときは、中性洗剤をご使用のうえ、こすらないようやさしく手洗いしてください。
ループ、金属部分ともに、手洗い後は、やさしく水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。

■ ループ ARIE ジョイント部分の留め方

留具の根元とループを持ち、**カチッ**と奥まではめてください。



ジョイント部分の取り外し方
留具の根元とループを持ち、矢印の方向へ引っ張ってください。



軽い力で着脱できる磁石式の留具のため、ジョイントはすれによる落下にご注意ください。

- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。入浴時は外してください。
- 製品に、化粧品類(スプレー・クリーム・香水含)が付着しないようご注意ください。成分に含まれる**油分及び揮発性成分**などにより、製品が傷む恐れがあります。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなど有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- 着脱の際は、必ず留具の根元とループを持って行ってください。ループ本体のみを引っ張って取り外しを行わないでください。

■ ループ レオオーネ お手入れ方法・その他


経年による変色・劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくため、以下の点にご注意ください。

- 天然皮革は汗や汚れを嫌いますので、出来るだけ締めつけない様にしてお使いください。汗、水などでぬれた場合は乾いた布等で拭いていただき、乾いた状態でご使用ください。
- **皮革は使用状況により色落ち・色移りすることがありますのでご注意ください。**
- 雨滴・水滴等により革の表面にふくらみや、シミが発生する場合があります。

ループ レオオーネ 留具に関するご注意


当商品は留具パーツ上部のブッシュボタンを押すと外せる構造になっていますので装着中に何かに当たったり、接触することで留具が外れる可能性があります。

特に留具パーツ部を内側にして着用する場合、身体等にブッシュボタンが接触して外れる恐れがありますので、注意してご使用ください。

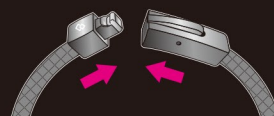

腕に着ける際、留具で皮を挟まないようご注意ください

ジョイント部分の取り外し方
必ずジョイント金具を持って下記のように留具を押して、取り外してください。

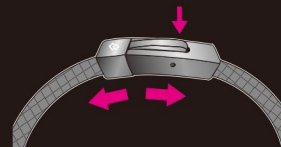

- 長時間直射日光にあたる場所や電灯等の光があたる場所に放置すると革の退色、変色の原因となります。
- 温度の高いところでの保管は革の硬化、変形等を引き起こします。

■ ループ レオオーネに 使用している 「栃木レザー」とは

- 動物の皮はそのままでは固くなったり腐ったりしてしまいますが、それを防ぐのが「鞣(なめ)し」と呼ばれる工程で、これによって「皮」が「革」になります。
- 日本で最高峰と言われる栃木レザー株式会社製のフルベジタブルタンニンレザー(ヌメ革)は「タンニン鞣し」の中でも昔ながらの手法で、現在主流の製法よりも何倍もの時間をかけて丁寧になめされたレザー素材です。
- この革は化学薬品を一切使用していないため、ほぼ100%土に還ることができます。伝統的な技術と革新的な智慧によって、自然に優しいエコロジカルな皮革作りを追求するブランドです。

<製品についてのお問い合わせは下記まで>

Colan Totte

製造販売元 株式会社コラントッテ
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-26
TEL(06)6258-7350 FAX(06)6258-7360
www.colantotte.jp ☎ 0120-080-523